



Uso en



Hospitales



Clinicas




Laboratorios




Otros

Especificaciones

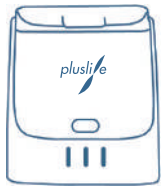

Pluslife Mini Dock

Dimensiones	101 x 91 x 65 mm
Peso	210 g
Conexión	Programa informático o aplicación móvil
Temperatura de funcionamiento	15°C–30°C
Humedad de funcionamiento	≤ 80%

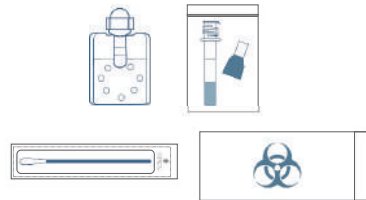

Pluslife RSV Card

Patógeno objetivo	RSV
Límite de detección (LdD)	1000 copias/mL
Tiempo de prueba	30 minutos
Vida útil	13 meses a temperatura ambiente
Tipo de muestra	Hisopo nasal / nasofaríngeo / orofaríngeo

Distribuido por

BIO SÝNEX
Ibérica

Guangzhou Pluslife Biotech Co.,Ltd.

Floor 3, Block E, Runhui Science & Technology Park, No.18 Shenzhou RD, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong, China

+86-020-31703986 market@pluslife.com www.pluslife.com



PLRSV-INT-20230322


Pluslife RSV Card

Virus respiratorio sincitial



Una prueba molecular POC rápida, precisa e in situ para enfermedades respiratorias

Pluslife RSV Card

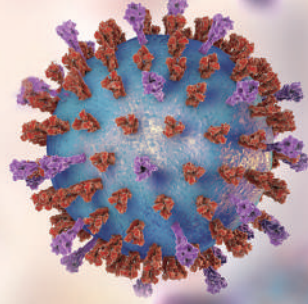

Pluslife Mini Dock es un sistema de diagnóstico molecular rápido que puede utilizarse para detectar el virus respiratorio sincitial (VRS). Nuestra tecnología de amplificación isotérmica de desarrollo propio, RHAM, proporciona excelentes resultados comparables a las pruebas qPCR. El producto es compacto y portátil, con un procedimiento sencillo que permite obtener resultados en 30 minutos.

Características



RÁPIDO

Resultados en 30 minutos



FÁCIL

Tiempo de manipulación inferior a 2 minutos



PRECISO

Límite de detección de 1000 copias/mL




ACCESIBLE

De la muestra al resultado en 4 pasos




Procedimiento de prueba

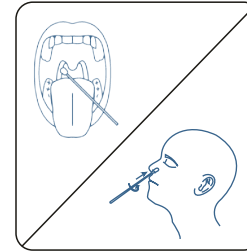


1. Recoger la muestra

Recoger la muestra con hisopos nasales, hisopos nasofaríngeos o hisopos orofaríngeos

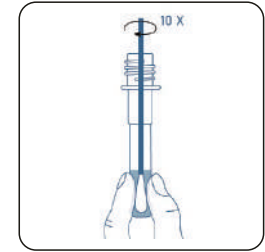


2. Mezclar la muestra

Introducir el hisopo en el tubo de muestra, mezclar, apretar 10 veces y desechar

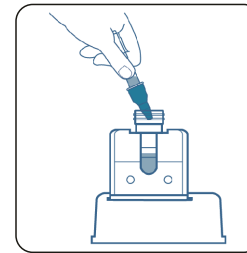

3. Preparar la tarjeta

Transferir la muestra a las cámaras de la tarjeta de reacción

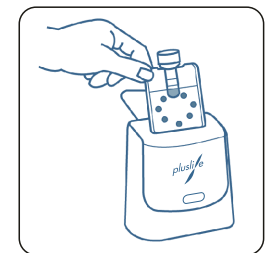

4. Ejecutar la prueba

Encienda el aparato e introduzca la tarjeta de reacción para iniciar la prueba

Resultados



✓ Mini Dock



✓ Programa para PC



✓ Aplicación móvil